

INTEGRAMOUSE



Die INTEGRAMOUSE öffnet neue Perspektiven

Computer leisten als Arbeitsgerät, Informationsquelle und Kommunikationsmittel einen wesentlichen Beitrag zu moderner Lebensqualität. Per Mausklick öffnen sich enorme Perspektiven. Auch für alle, die keine Möglichkeit haben, die Maus mit Händen zu bedienen. Die wird mit dem Mund gesteuert und bietet dem Benutzer eine vollwertige Alternative.



LifeTool

Computer aided Communication

Hilfsmittelnummer: 16.99.05.4005

DER ANDERE KLICK

INTEGRAMOUSE erlaubt es dem Benutzer, mit dem Mund alle Funktionen einer Computermouse zu aktivieren. Die dynamische Positionierung des Bildschirmzeigers erfolgt durch geringfügiges Auslenken des Mundstücks gegenüber dem feststehenden Steuergerät. Mausklicks mit der linken oder der rechten Maustaste werden durch Luftdruckveränderungen in der Mundhöhle und damit im Mundstück ausgelöst. Ein minimales Saugen oder Blasen genügt.